

INFANT INCUBATOR

INCUBADORA NEONATAL

A3186



**Wide and Ergonomic
Double Walled Hood**

*Amplia Cupula
Ergonómica de Doble
Pared*

**Servo Controlled System
Easy Operation**

*Sistema Servo Controlado
de Facil Operación*

Infant Incubator / Incubadora Neonatal

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Power supply: 110-220V, 50/60HZ
 Power input: 300 W
 Skin temperature control range: 25°C~37°C
 Temperature precision: $\leq 0.2^{\circ}\text{C}$
 Air temperature range: 20°C~39°C
 Air temperature override: $>37^{\circ}\text{C}$
 Maximum CO₂: $<0.2\%$
 Noise level: $\leq 55\text{DBA}$
 O₂ Control Range: 27~75%

Voltage: 110-220V, 50/60HZ
 Entrada de Voltage: 300 W
 Rango de Temperatura de piel: 25°C~37°C
 Precisión del sensor: $\leq 0.2^{\circ}\text{C}$
 Rango de Temperatura ambiental: 20°C~39°C
 Sobrepaso de temperatura: $>37^{\circ}\text{C}$
 CO₂Maximo: $<0.2\%$
 Nivel de Ruido: $\leq 55\text{DBA}$
 Rango de Control O₂: 27~75%

ALARMS

With audible and visible alarm, and it can indicate the real temperature and cut off the power supply of heater;

Over-temp alarm: when the skin temperature $>39.5^{\circ}\text{C}$;

Alarm Deviation: indication temperature deviates away the setting temperature $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Sensor alarm: when the sensor is disconnected, open circuit, short circuit or put on the outside of bed;

Power failure alarm: when start up the unit, and there is no power or the power cord is disconnected.

System alarm: when there is system malfunction inside of temperature controller.

ALARMAS

Con Alarma visible y audible, puede indicar temperatura real y puede cortar la energía de el calentador;

Alarma sobre-calentamiento: Cuando la temperatura es $>39.5^{\circ}\text{C}$;

Desviación de Alarma: cuando la indicación de la temperatura se desvía $\pm 1^{\circ}\text{C}$;

Alarma de Sensor: Cuando el sensor es desconectado, circuito abierto, corto circuito o es colocado fuera de la cuna;

Alarma contra falla de energía: Cuando se enciende la unidad, y no hay corriente eléctrica o el cable está desconectado.

Alarma del Sistema: Cuando hay fallas dentro del control de temperatura.

PACKAGE

Gross Weight : 2 Boxes Total wt 120Kg

Measurement : 109cm×69cm×173cm each box

Notice :

Some technical data of this model can be changed properly according to the standard and user's requirement. If the technical specification of above product changes, please refer to the standard at selling time.

EMPAQUE

Peso Bruto : 2 Cajas Peso Total 120 Kg

Medidas : 109cm×69cm×173cm cada caja

Notificación :

Algunas especificaciones técnicas de este modelo pueden ser cambiadas de acuerdo a los estándares y el requerimiento del usuario. Si las especificaciones técnicas de este producto cambian, por favor referirse a las especificaciones al momento de la venta.

Contact us for additional information.
 Contáctenos para información adicional.

NOTE: Specifications subject to change without notice.
 NOTA: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.